

においや菌をまるごとパック!! 使用済みおむつからの臭気・感染対策

らくらく
オートモード
搭載!!

エコムッシュ®

介護する人、される人、

みんな笑顔でいてほしい



株式会社

スミロン



使用済みおむつからの臭気・感染予防対策におむつパックシステム

笑顔の理由は、
エコムシュウの特長にあります

においも
ウィルスや菌も
パックして
衛生的！

笑顔の理由① へつづく

フラットパネルで
らくらく清掃

らくらく
オートモード
搭載!!

らくらく
スピーディーで
効率的！

笑顔の理由② へつづく

軽量コンパクト
らくらく移動

ガーゼ(滲出液等)、
手袋、ストーマパウチも
パック！

においだけでなく
ウィルスや菌もパック！
不快を快に！不安を安心に！

笑顔の理由①


気になるにおい対策・感染予防

オリジナルの特殊素材でにおいと菌を防ぎます。

使用済みおむつを運ぶだけでも気になるにおい。介護現場に染み付いてしまったにおいは、介護する人にとっても、される人にとっても大きなストレスになります。また、おむつからの二次感染の予防も、施設や病院にとっても大きな問題です。


そこで当社は、そのような問題点を解決するため、瞬時にフィルム同士が接着し、においやウィルス・菌を閉じこめる封止材を開発しました。

※ パック内容に伴い、各自治体、医師の指導に従って処理を行ってください。

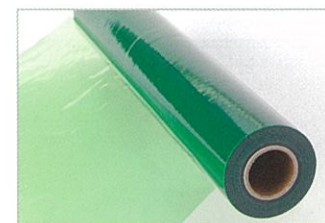

EMY4500 シリーズ 専用封止材 CC-450G

□ ご使用になられた方のお声

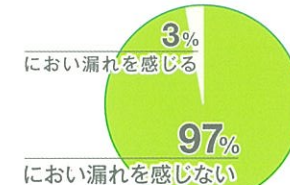

○効果・効能は、当社の検査データ、および病院・施設でのモニター調査の結果によります。

□ 試験検査報告 ● N.D.=検出限界以下 ● <10=検出せず

ウィルス名	Feline calicivirus (ネコカリシウイルス)	菌名	E.coli (大腸菌)	St.aureus (黄色ブドウ球菌)	C.difficile (クロストリジウム・ ディフィシル)	C.sporogenes (クロストリジウム・ スポロゲネス)
直後	N.D.	直後	<10	<10	<10	<10
1日後	N.D.	1日後	<10	<10	<10	<10
3日後	N.D.	3日後	<10	<10	<10	<10
7日後	N.D.	7日後	<10	<10	<10	<10

〈Feline calicivirus (ネコカリシウイルス)〉

試験依頼先: 学校法人北里研究所 / 北里大学北里研究所メディカルセンター病院
試験報告書発行年月日: 平成24年6月19日
試験番号: No.01201

※ネコカリシウイルスはノロウィルスの代替ウィルスです。

〈E.coli (大腸菌)・St.aureus (黄色ブドウ球菌)〉

検査: 社団法人京都微生物研究所
試験日: 平成19年7月26日
報告書番号: No.8171~8174

〈C.difficile (クロストリジウム・ディフィシル)・C.sporogenes (クロストリジウム・スポロゲネス)〉

試験依頼先: 財団法人日本食品分析センター
試験成績書発行年月日: 平成23年5月10日
試験成績書発行番号: 第11036258001-01号

笑顔の理由②

時間・手間の軽減

お好みのモードを選んで
介護時間にゆとりと笑顔を！

おむつを入れるだけ！のらくらくオートモード搭載！

エコムシュウは、安全・安心・スピーディーに使用済みおむつをパックし、介護時間の効率化・手間の軽減を図ります。

通常モードから、おむつを入れて取り出すだけのオートモード3までの4つのモードから、お好みのモードを選んでご使用できます。

エコムシュウの選べるモード

選択モード	特長
通常モード	スイッチを押している間、パック、カットを行うモードです。
オートモード1	パックもカットもワンタッチで開始するシンプルな操作です。
オートモード2	おむつを入れると自動でパックされ、任意のタイミングでカットすることができます。
オートモード3	パックもカットも全自動。おむつを入れて取り出すだけのらくらくモードです。

STEP1! 2! のらくらく手順

① おむつを投入



簡単 入れるだけ
オートモード

1.5秒!!でパック
(大人用おむつ1コ分の場合)

使用済みおむつを投入口に入れるだけで自動でパックされます。
(オートモード2・オートモード3の場合)

② カット後取出し



安心 素手でも
清潔安心

スピーディー 無駄なし
連続パック

パックされているので、素手でも安心して取り出せます。

■ エコムシュウ パック機仕様一覧

型 番	EMY-4550B (特許第 4066000 号)
特 長	投入された紙おむつをワンタッチでパック・カットする通常モードと、3 タイプのオートモードが選べます
装 置 寸 法	W440mm×D585mm (取手を含むと 698) ×H885mm
重 量	36kg (封止材除く)
操 作 性	おむつ投入後パックスイッチ押下、カットは任意にスイッチ押下、各オートモード選択可
安 全 性	起動条件成立確認 (カッター)、非常時：非常停止スイッチ押下、上部カバースイッチ
電 源	バッテリー内蔵：連続駆動時間 7 時間 (無負荷運転)、連続待機時間 48 時間 (メインスイッチ ON/ 電源 ON)、充電時間 2 時間 (※1)
保 証 期 間	1 年間 (※2)

※1 充電方法：専用充電器を使って AC100V より充電する。(各時間は、使用環境・使用頻度により異なります) ※2 但し、正常な取り扱いでの故障に限らせていただきます。

■ エコムシュウ 封止材仕様一覧

品 番	CC-450G (特許第 4195912 号)
形態/重量/寸法/色	ロール状 /2.5kg/W450mm×L100m/グリーン
封止材残量確認	封止材交換マーク付き
封 止 材 処 理	各自治体の処理方法に従ってください
入 り 数	5 セット/ ケース

※ 直射日光を避け、常温常湿の場所で保管してください。

**安全に関する
ご注意**

・ご使用前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
・取り扱いを誤りますと、故障や事故の原因になります。

エコムシュウ は、「NEDO 技術開発機構」
福祉用具実用化開発費助成金を受けて開発しました！

**独立行政法人
技術開発機構 新エネルギー・産業技術総合開発機構**

産学官の総力を結集して、我が国の産業技術とエネルギー・環境技術の未来を創る
このような技術開発を目指し、我が国最大規模の中核的な技術開発実施機関として、
高度なマネージメント機能を提供する独立行政法人です。

memo

地球への優しさとユーザーの強い要望にお応えします

スミロンの優れた粘着技術は、各種分野に広がりを見せています。各種製品・商品を外傷から守る保護フィルム・シートは、建材や自動車、精密機器、各種光学フィルム、エレクトロニクス、さらには建造物などの超大型まで、各種産業製品に広がっています。また、医療現場や製造工場などのクリーン・衛生に役立つ環境分野のほか、装飾用、印刷用、写真・看板用など、各界ユーザーのご要望に的確にお応えしています。今後も、さらに研鑽と努力を重ね、環境面でも十分配慮しながら新技術・新製品の開発に挑戦してまいります。

自動車業界

建材・金属業界

エレクトロニクス業界

住宅業界



株式会社 スミロン

〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町 11-9
TEL: 06-6763-0707 FAX: 06-6768-9176

東京支店
〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3-5-5
TEL: 03-5821-0707 FAX: 03-5821-0788

名古屋支店
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南 2-14-19
TEL: 052-582-6871 FAX: 052-561-8525



お問い合わせは

<http://www.ecomush.com/>